

Act+Fast™

Anti Choking Trainer

Act Fast LLC, www.actfastmed.com

Integra Medical, www.integramedical.eu

tel.: +48 690 043 799, e-mail: biuro@integramedical.eu

DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI:

INTEGRA MEDICAL SP. Z O.O.

UL. TRUSZKOWSKIEGO 52

31-352 KRAKÓW

NIP: 6772408253


INSTRUKCJA OBSŁUGI



1

NACIĄGNIJ KAMIZELKĘ NA GŁOWĘ I DOPASUJ RAMIĄCZKA ORAZ PAS, ABY DOBRZE PRZYLEGAŁY.

WŁÓŻ ZATYCZKĘ DO RURKI SYMBOLIZUJĄCEJ DROGI ODDECHOWE.

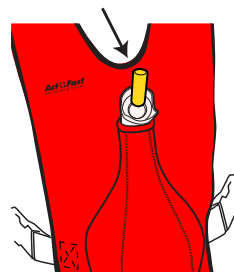

2


UMIEŚĆ DŁONIE W PRAWDŁOWEJ POZYCJI, MIĘDZY PĘPKIEM A KŁATKĄ PIERSIOWĄ, DELIKATNIE OPIERAJĄC JE O KAMIZELKĘ.



3

NASTĘPNIE WYKONAJ SZYBKI RUCH W GÓRĘ, ABY USUNĄĆ ZATYCZKĘ. PRAWDŁOWA TECHNIKA SPOWODUJE WYSTRZELENIE ZATYCZKI, ZAPEWNIĄJĄC NATYCHMIASTOWĄ INFORMACJĘ ZWROTNĄ.

NIE UŻYWAJ SIŁY! NIE JEST TO KONIECZNE I MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA.

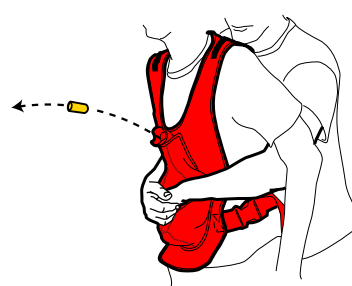

4


UŻYJ PODKŁADKI Z TYŁU KAMIZELKI, ABY POĆWICZYĆ UDERZENIA W PLECY.

UWAGA: NIE UŻYWAJ SIŁY! KAMIZELKA SŁUŻY TYLKO DO SYMULACJI.



KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- ♦ KOMPLETNA KAMIZELKĘ ACT FAST ADULT
- ♦ 10 ZIELONYCH ZATYCZEK / „CIAŁ OBCYCH” (DLA POCZĄTKUJĄCYCH UCZNIÓW)
- ♦ 20 ŻÓŁTYCH ZATYCZEK / „CIAŁ OBCYCH” (DLA ZAAWANSOWANYCH UCZNIÓW)
- ♦ TORBĘ TRANSPORTOWĄ
- ♦ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

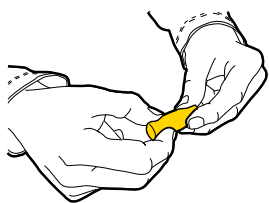


ZATYCZKI WYKONANE SĄ Z PIANKI I MOŻNA JE DOPASOWAĆ DO POTRZEB UCZESTNIKA.

ABY UŁATWIĆ ICH WYSTRZELENIE, ZATYCZKI MOŻNA ZMIĘKCZYĆ, ROLUJĄC JE MIĘDZY PALCAMI, LUB LEKKO SKRÓCIĆ.

ABY UCZYNIĆ JE TRUDNIEJSZYMI DO USUNIĘCIA, MOŻNA OWIĄĆ JE MAŁYM KAWĄŁKIEM TAŚMY.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

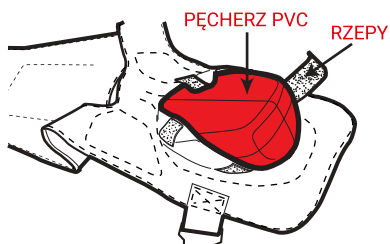

OD SPODU KAMIZELKI ODEPNIJ RZEPY I WYJMIJ PĘCHERZ PVC ORAZ IMITACJĘ DRÓG ODDECHOWYCH.

KAMIZELKĘ NALEŻY UMYĆ RĘCZNIE, UŻYWAJĄC ŁAGODNEGO DETERGENTU, ZAWIESIĆ DO WYSCHNIĘCIA.

KAMIZELKI TRENINGOWEJ MOŻNA UŻYWAĆ W RÓŻNYCH POZYCJACH DO TWORZENIA REALISTYCZNYCH SCENARIUSZY, W TYM: STANIA, SIEDZENIA I LEŻENIA. POZWALA TAKŻE UCZNIOWI ĆWICZYĆ SAMORATOWANIE PRZY UŻYCIU BLATU LUB KRZESŁA.

SPRZĘT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU POD NADZOREM INSTRUKTORÓW BHP