

Act Fast™

Anti Choking Trainer

Act Fast LLC, www.actfastmed.com

Integra Medical, www.integramedical.eu

tel.: +48 690 043 799, e-mail: biuro@integramedical.eu

DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI:


INTEGRA MEDICAL SP. Z O.O.

UL. TRUSZKOWSKIEGO 52

31-352 KRAKÓW


NIP: 6772408253

INSTRUKCJA OBSŁUGI

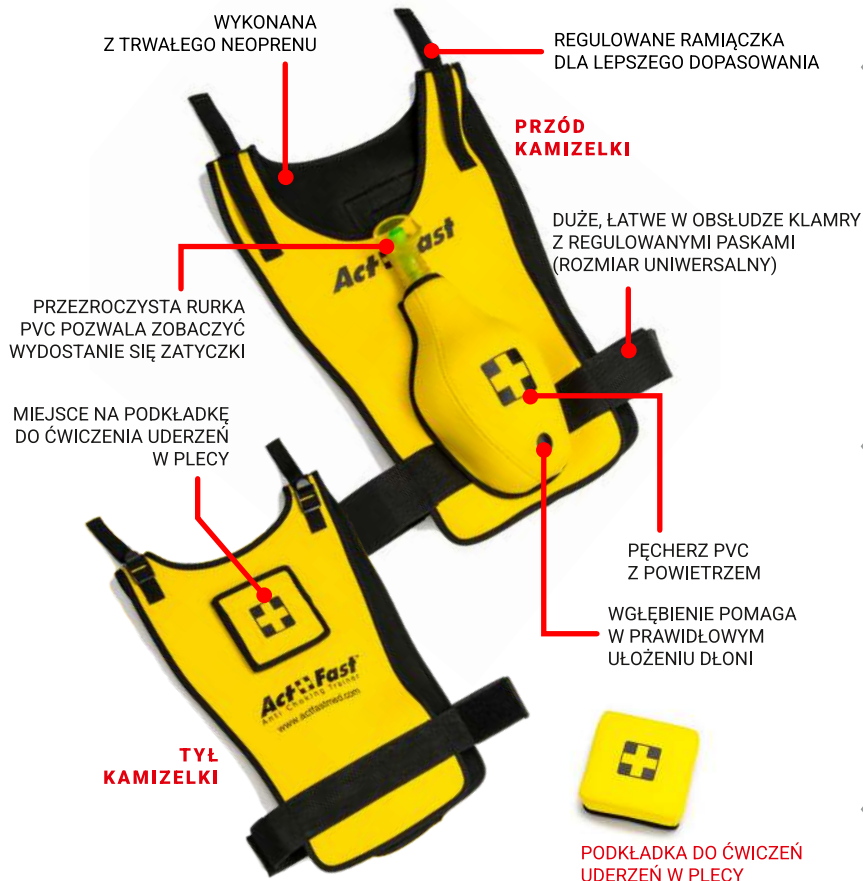

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- ♦ KOMPLETNĄ KAMIZELKĘ ACT FAST CHILD
- ♦ 30 ŻÓŁTYCH ZATYCZEK / „CIAŁ OBCYCH”
- ♦ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
- ♦ TORBĘ TRANSPORTOWĄ

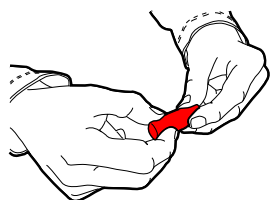


ZATYCZKI WYKONANE SĄ Z PIANKI I MOŻNA JE DOPASOWAĆ DO POTRZEB UCZESTNIKA.

ABY UŁATWIĆ ICH WYSTRZELENIE, ZATYCZKI MOŻNA ZMIĘKCZYĆ, ROLUJĄC JE MIĘDZY PALCAMI, LUB LEKKO SKRÓCIĆ.

ABY UCZYNIĆ JE TRUDNIEJSZYMI DO USUNIĘCIA, MOŻNA OWIĄZAĆ JE MAŁYM KAWAŁKIEM TAŚMY.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

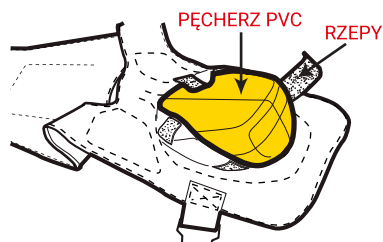


OD SPODU KAMIZELKI ODEPNIJ RZEPY I WYMIJ PEŁCZERZ PVC ORAZ IMITACJĘ DRÓG ODDECHOWYCH.


KAMIZELKĘ NALEŻY UMYĆ RĘCZNIE, UŻYWAJĄC ŁAGODNEGO DETERGENTU, ZAWIESIĆ DO WYSCHNIĘCIA.

- 1 NACIĄGNIJ KAMIZELKĘ NA GŁOWĘ I DOPASUJ RAMIĄCZKA ORAZ PAS, ABY DOBRZE PRZYLEGAŁY.
WŁÓŻ ZATYCZKĘ DO RURKI SYMBOLIZUJĄCEJ DRÓGI ODDECHOWE.
- 2 UMIEŚĆ DŁONIE W PRAWIDŁOWEJ POZYCJI, MIĘDZY PĘPKIEM A KŁATKĄ PIERSIOWĄ, DELIKATNIE OPIERAJĄC JE O KAMIZELKĘ.
- 3 NASTĘPNIE WYKONAJ SZYBKĄ RUCH W GÓRĘ, ABY USUNĄĆ ZATYCZKĘ. PRAWIDŁOWA TECHNIKA SPOWODUJE WYSTRZELENIE ZATYCZKI, ZAPEWNIĄC NATYCHMIASTOWĄ INFORMACJĘ ZWROTĄ.
- 4 UŻYJ PODKŁADKI Z TYŁU KAMIZELKI, ABY POĆWICZYĆ UDERZENIA W PLECY.

NIE UŻYWAJ SIŁY! NIE JEST TO KONIECZNE I MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA.

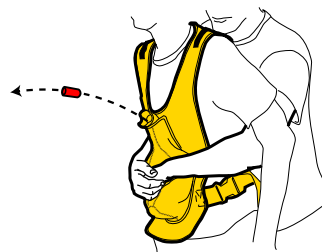

UWAGA: NIE UŻYWAJ SIŁY! KAMIZELKA SŁUŻY TYLKO DO SYMULACJI.

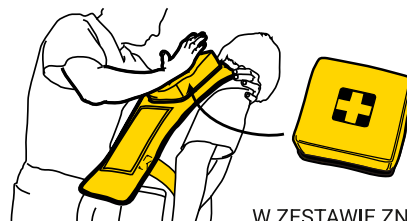

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ OPCJONALNA PODKŁADKA NA PLECY. WYSTARCZY ZDJĄĆ RZEP ACT FAST Z TYŁU KAMIZELKI I WYMIENIĆ GO NA PODKŁADKĘ.

KAMIZELKI TRENINGOWEJ MOŻNA UŻYWAĆ W RÓŻNYCH POZYCJACH DO TWORZENIA REALISTYCZNYCH SCENARIUSZY, W TYM: STANIA, SIEDZENIA I LEŻENIA. POZWALA TAKŻE UCZNIOWI ĆWICZYĆ SAMORATOWANIE PRZY UŻYCIU BLATU LUB KRZESŁA.

SPRZĘT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU POD NADZOREM INSTRUKTORÓW BHP