



Instrukcja Montażu

MODEL:
ACB-3
2026 V.1.1

1. Wprowadzenie

AED Climate BOX to innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane specjalnie do ochrony i utrzymywania defibrylatorów AED w optymalnych warunkach, tak aby były gotowe do użycia przez całą dobę. Ze względu na kluczową rolę, jaką defibrylatory odgrywają w ratowaniu życia, ich sprawność i dostępność w każdych warunkach mają absolutnie podstawowe znaczenie. Niestety niewłaściwe warunki przechowywania, takie jak skrajne temperatury, mogą poważnie uszkodzić urządzenie, a nawet całkowicie uniemożliwić jego działanie. Często wychodzi to na jaw dopiero w momencie, gdy defibrylator jest najbardziej potrzebny.

Rozwiązaniem tych wyzwań jest AED Climate BOX, który oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczające, w tym:


- **Wentylację grawitacyjną**, zapewniającą stały przepływ powietrza i utrzymanie prawidłowej cyrkulacji wewnątrz obudowy,
- **Alarm otwarcia drzwi**, stanowiący zabezpieczenie przed potencjalną kradzieżą defibrylatora AED.



UWAGA! Aby zapewnić pracę defibrylatora w dopuszczalnym zakresie temperatur, należy upewnić się, że obudowa nie jest narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W przypadku montażu w miejscu nasłonecznionym należy zastosować inny dostępny model AED Climate BOX z wentylacją mechaniczną.

2. Zawartość opakowania

- AED Climate Box
- Szablon wiercenia

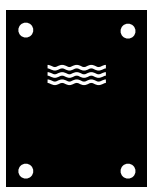


Szablon wiercenia



AED Climate Box


3. Korpus AED Climate BOX

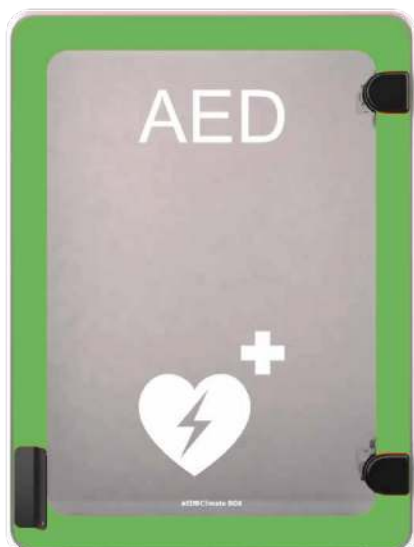

UWAGA! Otwory wentylacji mechanicznej. Nie zasłaniać!

4. Montaż na ścianie

Wywierć otwory w ścianie, korzystając z szablonu montażowego.

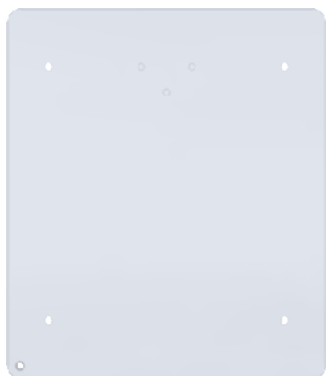

5. Umieszczenie AED w obudowie

1. Zawieś urządzenie AED w obudowie na uchwycie zamontowanym w górnej części obudowy.




6. Włączenie alarmu otwarcia drzwi

Aby włączyć alarm otwarcia drzwi, przełącz włącznik znajdujący się z boku alarmu, dostępny od wewnętrznej strony obudowy.



7. Wymiana baterii

Aby wymienić baterię, odkręć śrubę, przesunij pokrywę w lewo i wyjmij baterie (3 × LR44).

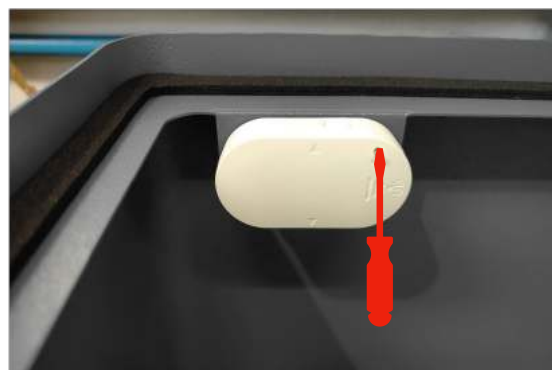

8. Dane techniczne

Model	ACB-3
<i>Właściwości mechaniczne</i>	
Materiał	DC 01 1,0 mm
Kolor standardowy	RAL 9010
Zakres temperatur pracy	5°C / 40°C
Klasa IP	20
Poziom dźwięku alarmu w odległości 1 m	72dB
Wymiary zewnętrzne	300x400x135
Wymiary miejsca na AED / DAE	230x310x95
Waga	3,8 kg

AED Climate BOX

**GRAS PPPH
77-230 Korzybie
ul. Sławieńska 12
Polska
www.aedcb.com**