


INNOSONIAN


BRAYDEN **BABY**

Instrukcja użytkowania

Wer.1.0

POLSKI

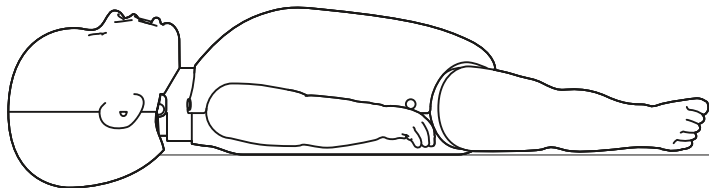

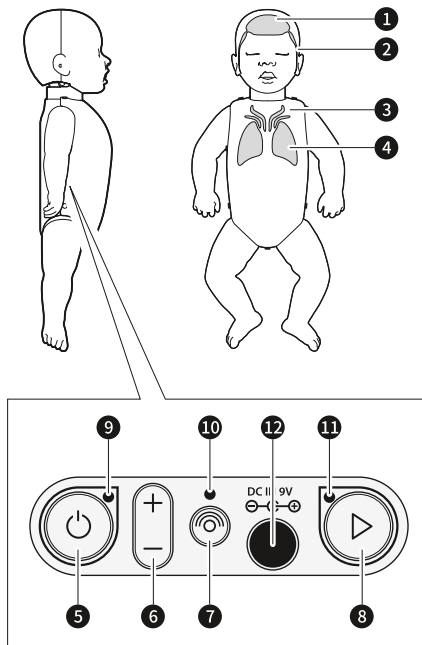

A Elementy

- 1 **Wskaźnik jakości RKO** Wskaźnik jakości RKO włącza się w przypadku wykrycia prawidłowej głębokości uciśnięć klatki piersiowej, szybkości, zwolnienia ucisku oraz prawidłowego ułożenia palców (lub kciuków).
- 2 **Wskaźnik szybkości uciśnięć klatki piersiowej** Wskazuje szybkość/liczbę wykonywanych uciśnięć klatki piersiowej.
- 3 **Wskaźnik głębokości uciśnięć klatki piersiowej** Wskazuje głębokość wykonywanych uciśnięć klatki piersiowej.
- 4 **Wskaźnik wentylacji** Wskazuje objętość wdychanego powietrza.
- 5 **Przycisk zasilania** Naciśnij przycisk zasilania na ok. 1 sekundę, aby włączyć/wyłączyć fantom.
- 6 **Przycisk (+) i (-)** Włącza/wyłącza informacje zwrotne dotyczące wentylacji (tylko model Brayden Baby Pro)
- 7 **Przycisk rozłączenia Bluetooth** Anuluje połączenie Bluetooth (tylko model Brayden Baby Pro)
- 8 **Przycisk trybu scenariusza** Przytrzymaj dłużej przycisk trybu scenariusza aby włączyć puls ramienny na lewym ramieniu (tylko model Brayden Baby Pro)
- 9 **Wskaźnika zasilania** Świeci na niebiesko przy prawidłowym poziomie naładowania baterii i błyska na czerwono, gdy poziom naładowania baterii jest niski.
- 10 **Wskaźnik statusu połączenia Bluetooth** Świeci na niebiesko po nawiązaniu łączności Bluetooth.
- 11 **Wskaźnik trybu scenariusza** Świeci na niebiesko, aby zasygnalizować, że fantom działa aktualnie w trybie scenariusza. (tylko model Brayden Baby Pro)
- 12 **Gniazdo zasilacza sieciowego** Umożliwia podłączenie opcjonalnego zasilacza sieciowego.

B Instalowanie i łączenie z aplikacją mobilną

1. Wyszukaj **aplikację fantomu BRAYDEN ONLINE** w sklepie App Store dla urządzenia **iPad** (OS 14 lub nowszy) lub aplikację **BRAYDEN PRO** w sklepie Sklep Play dla tabletów i telefonów **Samsung** (Android OS 13) i zainstaluj ją. Opcjonalnie zainstaluj aplikację internetową **BRAYDEN ONLINE** wykorzystując przeglądarkę **Chrome**.
2. Włącz fantom i uruchom aplikację.
3. Naciśnij przycisk **Połącz** w aplikacji i wybierz żądany produkt, aby nawiązać połączenie.
4. Po naciśnięciu przycisku **Połącz** fantom i aplikacja nawiążą połączenie, a **wskaźnik statusu połączenia Bluetooth** zaświeci się w kolorze niebieskim.

(Uwaga) Po pierwszym ręcznym nawiązaniu połączenia kolejne połączenia będą nawiązywane automatycznie.

C Informacje podawane przez wskaźniki informacji zwrotnych RKO w czasie rzeczywistym

1. Wentylacja

- a. **Wskaźnik wentylacji** włącza się, gdy ilość wdychanego powietrza jest prawidłowa i błyska w przypadku jego nadmiernej ilości.

2. Uciski klatki piersiowej

- a. **Wskaźnik głębokości uciśnień klatki piersiowej** włącza się zgodnie z głębokością wykonywanych uciśnień. Jeśli uciśnięcia są zbyt mocne, błyskają wszystkie światła.
- b. **Wskaźnik szybkości uciśnień klatki piersiowej** (biegnący od klatki piersiowej do głowy) włącza się zgodnie z liczbą/szybkością wykonywanych uciśnień. Jeśli błyska zbyt szybko, oznacza to, że liczba/szybkość uciśnień jest zbyt duża.
- c. **Wskaźnik jakości RKO** włącza się w przypadku wykrycia prawidłowej głębokości uciśnień klatki piersiowej, szybkości, zwolnienia ucisku oraz prawidłowego ułożenia palców (lub ciuków).

(Uwaga)

- Jeśli fantom jest włączony, przez ok. 2 sekundy będzie trwał jego wstępna automatyczna kalibracja. Zaleca się, aby w tym czasie nie wykonywać uciśnień klatki piersiowej fantomu.

(Uwaga) tylko model Brayden Baby Pro

- Podczas łączenia fantomu z aplikacją szkoleniową wskaźniki informacji zwrotnych RKO w czasie rzeczywistym będą wyłączone

D Konserwacja fantomu

1. Zalecamy częstą wymianę **podwójnego filtra wentylacji** (patrz skrócona **instrukcja obsługi <rozdział 3-3>**) i zawsze po bezpośredniej wentylacji bez urządzenia barierowego (np. odpowiedniej maseczki na twarz, maseczki kieszonkowej itp.).
2. Wymieniając skórę twarzy, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji w skróconej **instrukcji obsługi <rozdział 3-2>**. Jest to szczególnie ważne, ponieważ nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do nieszczelności. Ważne jest również prawidłowe zamocowanie skóry twarzy do mechanizmu podbródka w prawidłowej pozycji (zamkniętej/cofniętej). Należy sprawdzić, czy funkcja **podciągania/unoszenia** żuchwy działa prawidłowo.
3. **Oprogramowanie** układowe fantomu można zaktualizować za pośrednictwem aplikacji. Jeśli wystąpi taka konieczność, po połączeniu fantomu na ekranie aplikacji zostanie wyświetlony komunikat. Oprogramowanie układowe należy zaktualizować zgodnie z instrukcjami.

E Baterie

1. Zużyte baterie trzymać poza zasięgiem dzieci i bezpiecznie zutylizować.
2. Nie stosować wspólnie nowych i starych baterii.
3. Wymieniać wszystkie 4 baterie na raz.
4. Jeśli fantom nie będzie wykorzystywany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie i przechowywać je poza fantomem.

F Specyfikacja produktu

1. **Wymiary** : 22,4 cm x 55 cm x 11,5 cm (szer. x wys. x gł.)
2. **Masa** : 1,72 kg (bez baterii)
3. **Temperatura robocza** : 0°C–40°C (32°F–104°F)
4. **Temperatura przechowywania** : -20°C–60°C (-4°F–140°F)
5. **Wilgotność** : wilgotność względna od 5 do 95% (bez kondensacji)
6. **Zasilanie** : baterie typu AA 1,5 V (4 EA)
zasilacz sieciowy (wejście AC 100-260 V, wyjście DC 9 V 1 A, sprzedawany osobno)

G Gwarancja jakości

Fantom jest objęty gwarancją na wady przez okres 2 lat od daty zakupu. Nie obejmuje ona jednak elementów eksploatacyjnych. W przypadku zgłaszania reklamacji należy dołączyć dowód zakupu oraz szczegóły dotyczące zakupu fantomu (data i miejsce), co pozwoli nam zweryfikować okres gwarancji. W razie braku dowodu zakupu lub możliwości ustalenia, czy produkt jest objęty gwarancją, bezpłatna naprawa może nie zostać uznana.

- Uszkodzenie lub usterka fantomu wskutek niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub błędu użytkownika
- Uszkodzenie lub usterka fantomu wskutek nieautoryzowanej naprawy w miejscu innym niż zakład producenta, upoważniona agencja sprzedaży albo centrum serwisowe, lub wskutek wymiany elementów na produkty innej firmy, których nie dostarczamy
- Uszkodzenie lub usterka fantomu wskutek nieprawidłowego przechowywania w nieodpowiednich warunkach (wysoka temperatura, wysoka wilgotność) lub wskutek narażenia na działanie środków chemicznych albo drobnoustrojów
- Uszkodzenie lub usterka fantomu wskutek katastrofy naturalnej itp.
- Intencjonalne fałszowanie najważniejszych informacji (np. daty zakupu, nazwy klienta, nazwy dostawcy, numeru seryjnego fantomu itp.)
- W przypadku braku dowodu zakupu z gwarancją dotyczącą fantomu

Innosonian, Inc.

Strona główna www.innosonian.com
Adres 4F, 62, Bangbae-ro, Seocho-gu, Seoul, 06704, Korea Południowa
Tel. +82-2-533-9410
Faks +82-70-8673-5285
E-mail info@innosonian.com

Innosonian Europe

Strona główna www.innosonian.eu
Adres Unit 1, Chancerygate Way, Farnborough, Hampshire GU14 8FF, Wielka Brytania
Tel. +44-3333-445534
E-mail enquiries@innosonian.eu

Innosonian America

Strona główna www.innosonian.us
Adres 50 Broad Street, Carlstadt, NJ, 07072, USA
Tel. +1-833-385-0022
E-mail hello@innosonian.us

Oświadczenie FCC

Nazwa produktu	BRAYDEN BABY
Nazwa modelu	IM17
Producent/kraj	Innosonian, Inc./Korea
Ident. FCC modułu RF Bluetooth	RYEYSHCN

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega dwóm warunkom określonym poniżej: (1) urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi odbierać inne zakłócenia, w tym powodujące niepożądane działanie.

Informacje dla użytkownika

Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te przepisy mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed niebezpiecznym oddziaływaniem instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fali radiowych i w przypadku instalacji lub użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi, może powodować zakłócenia szkodliwe dla komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli niniejsze urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić włączając je i wyłączając, zachęca się użytkowników do podjęcia próby zmniejszenia tych zakłóceń za pomocą następujących środków:

- Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego w obwodzie innym niż ten, do którego jest podłączony odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ostrzeżenie

Wszystkie zmiany i modyfikacje niezatwierdzone jednoznacznie przez producenta mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi tego urządzenia



Ten fantom spełnia wymagania środowiskowe wskazane w dyrektywie EMC 2014/30/WE oraz w dyrektywie WE RoHS 2011/65/WE w zakresie substancji niebezpiecznych.

Środki ostrożności podczas utylizacji baterii

Nie utylizować baterii poprzez ich spalanie. Należy oddać je do lokalnego, bezpłatnego punktu odbioru baterii.