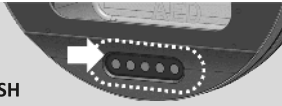
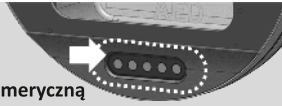


6. Jak zmienić hasło oraz tryb szafki

※ **UWAGA:** Domyślnie wszystkie nowe szafki jako bieżące hasło mają **1234** i są w **TRYBIE ZABLOKOWANYM**. Zdecydowanie zalecamy zmianę hasła.

Dla Szafek w trybie ODBLOKOWANYM (otwieranie bez kodu)	Dla Szafek w trybie ZABLOKOWANYM (otwieranie za pomocą kodu)
Aby zmienić aktualne hasło: - naciśnij „OK” i otwórz drzwi szafki - naciśnij przycisk „SET” - wprowadź aktualne hasło - naciśnij „OK” - wprowadź nowe hasło - naciśnij „OK” - wprowadź nowe hasło - naciśnij „OK” i zamknij drzwi szafki	Aby zmienić aktualne hasło: - wprowadź aktualne hasło - naciśnij „OK” - otwórz drzwi szafki - naciśnij przycisk „SET” - wprowadź aktualne hasło - naciśnij „OK” - wprowadź nowe hasło - naciśnij „OK” - wprowadź nowe hasło - naciśnij „OK” - zamknij drzwi szafki
Aby zmienić tryb szafki z ODBLOKOWANY na ZABLOKOWANY: - naciśnij „OK” i otwórz drzwi szafki - naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „SET” i „OK” przez 3 sekundy - sprawdź, czy na wyświetlaczu pojawi się „0-NE” - wprowadź aktualne hasło i naciśnij „OK” - zamknij drzwi szafki	Aby zmienić tryb szafki z ZABLOKOWANY na ODBLOKOWANY: - wprowadź aktualne hasło - naciśnij „OK” - otwórz drzwi szafki - naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „SET” i „OK” przez 3 sekundy - sprawdź, czy na wyświetlaczu pojawi się „0-NE” - wprowadź aktualne hasło i naciśnij „OK” - zamknij drzwi szafki
 PUSH → Przyklej naklejkę PUSH na panelu klawiatury	 1 2 3 4 Przyklej naklejkę numeryczną na panelu klawiatury

7. Rozwiązywanie problemów (kody błędów)

Kod błędu	Co należy zrobić
E—01 Blokada zamka próbowała się podnieść / odblokować, ale nie udało się otworzyć szafki.	Sprawdź, czy na drodze drzwiczek nie ma żadnych przeszkód lub czy nie są zalokowane mechanicznie.
E—02 Blokada zamka próbowała się opuścić / zablokować, ale nie udało się zamknąć szafki.	Sprawdź, czy nie ma przeszkód lub czegośkolwiek, co mogłoby blokować zamknięcie drzwiczek.
E—03 Przycisk został naciśnięty więcej niż 8 razy, bądź się zablokował.	Sprawdź, czy przycisk nie jest z jakiegoś powodu zablokowany lub czy nie jest uszkodzony.
E—05 Blokada zamka jest opuszczona / zablokowana, ale czujnik nie wykrywa drzwiczek.	Sprawdź, czy w pobliżu zamka szafki nie ma źródła magnetycznych zakłóceń lub czy zamek nie jest uszkodzony lub zanieczyszczony.



www.defibsafe.co.uk

1. Przegląd produktu

- **Zewnętrzna dioda LED:** szafka zamknięta (zielony) / otwarta (czerwony).
- **Oświetlenie wewnętrzne:** automatyczne włączanie/wyłączanie (czujnik zmierzchu).
- **Wyświetlacz:** temperatura wilgotność szafka zamknięta szafka otwarta
- **Alarm dźwiękowy:** alarm jest aktywowany po otwarciu drzwi.
- **Klawiatura numeryczna:**
 - dla szafek w trybie zablokowanym:
wprowadź 4-cyfrowe hasło i naciśnij przycisk „OK” aby odblokować i otworzyć szafkę.
 - dla szafek w trybie odblokowanym:
naciśnij przycisk „OK” aby odblokować i otworzyć szafkę.
- **System kontroli temperatury:**
 - ogrzewanie: działa, gdy temperatura wewnątrz szafki spadnie poniżej 5°C.
 - chłodzenie: działa, gdy temperatura wewnątrz szafki przekroczy 30°C.

2. Specyfikacja produktu


- **Rozmiar:**
 - zewnętrzne: średnica: 52 cm, głębokość: 22 cm,
 - wewnętrzne (wnęka na AED): szerokość: 32 cm, wysokość: 34 cm, głębokość: 13-15 cm
- **Waga:** korpus ok. 5,5 kg, wspornik ok. 1,5 kg lub mniej.
- **Zasilanie:** 100 — 240V.
- **Materiał:** korpus: ABS + poliwęglan, wspornik: żelazo.
- **Adapter:** wejście: 100 - 240V 50/60Hz 1,5A, wyjście: 12V - 5,0A.

3. Instrukcja użytkowania



- **Otwórz kapsułę:**
 - tryb odblokowany (bez kodu): naciśnij „OK” i otwórz drzwi szafki.
 - tryb zablokowany (z kodem): wprowadź hasło, naciśnij „OK” i otwórz drzwi szafki.
- Po otwarciu szafki zewnętrzna dioda LED zaświeci się na czerwono i włączy się alarm dźwiękowy.
- **Odepnij opaskę**, aby wyciągnąć AED w celu jego do użycia.
- Gdy defibrylator AED jest gotowy do ponownego umieszczenia w kapsule, należy użyć opaski, aby zamocować go z powrotem na miejscu, a następnie należy zamknąć drzwiczki szafki.


4. Komponenty w zestawie

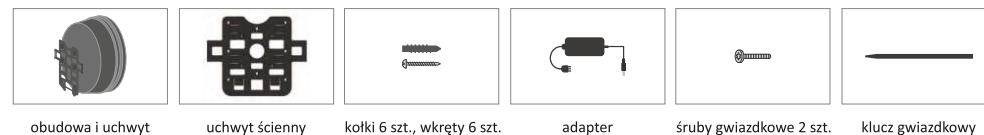

5. Wytyczne dotyczące instalacji


Montaż uchwyty ściennego:

1. Przyłóż wspornik do ściany (zalecane minimum 90 cm od podłogi do podstawy szafki) i upewnij się, że jest wypoziomowany.
2. Używając wspornika jako szablonu, zaznacz miejsca, w których należy wywiercić sześć otworów.
3. Wywierć otwory wiertłem o średnicy 8 mm na głębokość co najmniej 45 mm.
4. Włóż kołki rozporowe i użyj sześciu wkrętów, aby przykręcić wspornik do ściany.

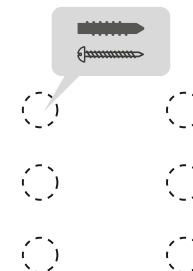

Montaż szafki:

1. Przymocuj cztery tylne haki obudowy do rowków wspornika ściennego.
2. Przymocuj połączenia wspornika po lewej/prawej stronie za pomocą dołączonych śrub gwiazdkowych i klucza (w celu zabezpieczenia przed kradzieżą).

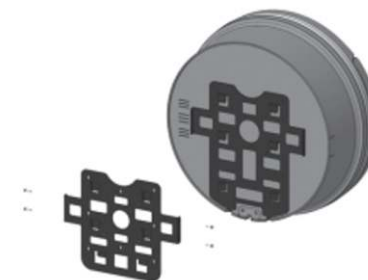

Podłączenie zasilania:

W razie potrzeby wywierć otwór na przewód zasilający, aby przeprowadzić go przez ścianę, a następnie podłącz przewód zasilający do źródła zasilania.

- ※ **OSTRZEŻENIE** - Nie należy podejmować prób instalacji elektrycznej DefibSafe 3, jeśli nie jest się wykwalifikowanym elektrykiem. Może to spowodować obrażenia ciała użytkownika lub innych osób.
- ※ **SPRAWDŹ** zewnętrzne podświetlenie LED, stan wyświetlacza i stan sygnału ostrzegawczego po podłączeniu do zasilania.
- ※ **UPEWNIJ SIĘ**, że transformator, okablowanie i złącza w żaden sposób NIE SĄ narażone na działanie czynników zewnętrznych.